

VSTREKOVANÝ OKULIAROVÝ RÁM

Proces montáže:

Výměna okuliarové šošovky do rámov z TR-90 alebo Ultem materiálu (montáž za studena)

Vybratie šošoviek:

Obidvomi rukami jemne prehnite okuliarový rám.

Ľahkým tlakom zatlačte na demo šošovku zvnútra von.

Vloženie nových šošoviek:

Šošovky musia mať zodpovedajúci rozmer, nesnažte sa do toho vtlačiť šošovku ak je väčšieho rozmeru, vzniknuté napätie môže spôsobiť prasknutie rámu, ktoré je považované za mechanické poškodenie produktu bez nároku na reklamáciu. V prípade žiadosti o posúdenie reklamácie vložte, prosím, tiež pár použitých šošoviek. Šošovky musia byť dobre zabalené zvlášť a poistené vo výške predajnej hodnoty.

Umiestnite čo najpresnejšie fazetu šošovky do drážky v ráme.

Jemne zatlačte šošovku na miesto. Začnite od jednej strany a postupujte dookola, kým šošovka nezacvakne.

Záverečná kontrola:

Uistite sa, že šošovka je bezpečne upevnená, stabilná a bez medzier.

Typ: Nezhrievajte nad teplotu 30°C; rámy TR-90 a Ultem sa môžu deformovať.

Používajte jemný a rovnomerný tlak. Nepoužívajte prípravky s obsahom alkoholu!