

Návod na použitie a údržbu okuliarových rámov

Informácie a odporúčania pre užívateľov okuliarov

Distribútor: Aglaja SK s.r.o., Vyšná Kamenica 100, PSČ: 044 45, IČ: 47442832, DIČ: SK2023908733, www.aglaja.sk

Okuliare sú zdravotnícky prostriedok určený na korekciu zraku, pri ich výbere sa vždy poraďte s odborníkom.

Vyhlasenie o zhode nájdete na <https://aglaja-b2b.s28.upgates.shop/prohlaseni-o-shode>

Návod na použitie: <https://aglaja-b2b.s28.upgates.shop/na-vod-na-pouz-iti-a-u-drz-bu>

Typy a odporúčania, ako používať okuliare, aby vydržali čo najdlhšie.

Ako zabrániť škodám vzniknutým nesprávnym zaobchádzaním prípadne nesprávnou údržbou?

Za závady vzniknuté chybou materiálu alebo chybou vo výrobe ručíme po celú zákonom stanovenú záručnú lehotu.

Prosím, prečítajte si a dodržujte nasledujúce inštrukcie, ktoré pomôžu udržať okuliarové rámy v perfektnom stave čo najdlhšie.

Návod na použitie a údržbu okuliarov

Popis výrobku:

- Okuliarové rámy sú dodávané s prezentačnými sklami. Do rámov musia byť profesionálne vsadené dioptrické šošovky a to očným optikom za použitia vhodného optického náradia.
- Nejedná sa o ochranné okuliare, podľa smerníc 89/688/CEE
- Nejedná sa o slnečné okuliare, podľa smerníc 89/686/CEE
- Okuliarové rámy sú určené na bežné použitie ako je čítanie, bežné pracovné aktivity, prechádzky, riadenie vozidiel, atď. okrem činností, ktoré môžu náhodne spôsobiť mechanické škody, ako napr. pracovné a športové aktivity spojené s hádzaním či vrhaním predmetov (lopta, guľa, kladivo, oštep), prílišné nárazy atď., pokiaľ nie je inak označené v N.I., ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo pre nositeľa.

Upozornenie:

- Nenechávajte okuliare na odkladacích plochách, pracovných doskách, sedačkách, aby ste sa vyhlí náhodným poškodeniam (poškriabaniu, zlomeniu, deformácii...).
- Nechodte spať a nedriemajte s okuliarmi na tvári, vždy okuliare ukladajte do puzdra.
- Pokiaľ sú okuliare zhotovené na videnie do blízka, nie sú vhodné na iné účely.
- Vyhnite sa dlhému vystaveniu okuliarov slnečnému žiareniu alebo tepelným zdrojom, aby ste predišli eventuálnym deformáciám, zmenám farby, zmenám plastových zložiek, spáleniu
- Vyhýbajte sa nárazom (výrobca v prípade zásahu airbagu vo vozidle považuje podnet za nadmerný - možnosť zranenia užívateľa okuliarov).
- Nepribližujte kovové diely okuliarového rámu intenzívnym magnetickým, elektrickým a elektromagnetickým poliam, kovové diely sú dobrými vodičmi tepla a elektriny.
- Uistite sa o elektromagnetickej kompatibilite podľa smerníc 89/336/CEE elektrických zariadeniach ako akustické protézy alebo iné prístroje.

- Vyhýbajte sa vystaveniu rádioaktívnym zdrojom (napr. röntgenové lúče), obzvlášť pri obrúčkach s kovovými dielmi.

- Nenechávajte okuliare v dosahu malých detí, môžu ich zdeformovať.

- Vyhýbajte sa znečisteniu akoukoľvek látkou, ktorá by mohla byť zdraviu nebezpečná.

- Okuliarový rám nie je vhodný na použitie v extrémnych teplotných podmienkach (použitie je predpokladané v teplotnom rozmedzí -10°C do +50°C).

Nenechávajte okuliare na palubnej doske vozidla ani vo vnútri vozidla pokiaľ sú okolité teploty extrémne vysoké, nízke (+30°C, pod -10°C). Nechodte v nich do sauny, kryosauny.

- Nepoužívajte výrobok, ak sú na ňom evidentné známky opotrebenia.

- Organické detaily (drevo, korytnačina, koža atď.) by mohli byť pôvodcom neznámych infekčných nákaz.

- Pri použití retiazok alebo iných doplnkov na zavesenie okuliarov na krk alebo na časti odevu je zakázané používať stroje a prístroje v pohybe, napr. fréza, sústruh atď., aby nedošlo k zachyteniu a následnému úrazu.

Opotrebenie výrobku:

- Predmet je vystavený opotrebeniu spôsobenému chemickými roztokmi alebo produktmi, kozmetikou, svetelnými a tepelnými zdrojmi. Je vhodné dodržiavať procesy čistenia a tu spomínané upozornenia a vyhnúť sa styku so zvlášť agresívnymi látkami.

Rady pre správne použitie:

- Pri nasadzovaní a odkladaní okuliarov ich uchopte vždy za obe stranice súčasne.

- Ak sa prejavia zmeny posadenia okuliarov na tvári (obruba sadne inak, než bola prevzatá od optika), vráťte sa k optikovi, aby okuliare upravil. Toto je podstatné pre správne použitie, zvlášť v prípadoch predpisania vo vývojovom veku (je nevyhnutný správny vývoj zrakovej funkcie).

- Vyvarujte sa opakovaným denným gestám (posúvanie okuliarov do vlasov, držanie rámu za jednu stranicu, manipulácia s koncovkami), ktorá by mohla pôsobiť negatívne na okuliare.

- Používajte púzdra zodpovedajúcich rozmerov a také, ktoré chránia okuliare zodpovedajúcim spôsobom.

- Ak nie je možné odložiť okuliare do puzdra, nekladte ich sklami na plochu. Zabráňte kontaktu s brúsnyimi plochami.

- Nezabúdajte okuliare blízko tepelných zdrojov a nevystavujte ich extrémnym podmienkam prostredia, ako napr. v saune, kaderníckej helme, vyhriatom aute vystavenej slnku atď.

- Pokiaľ sa objaví alergická reakcia kože v mieste kontaktu s okuliarmi, predpokladá sa alergia na materiál okuliarovej rámy. Je nutná konzultácia s optikom o prípadnej úprave okuliarov, odporúča sa vzdialenie alebo izolácia daného alergénu.

Udržiavanie technického stavu:

- Pravidelne nechajte kontrolovať utiahnutie skrutiek straníc okuliarových rámov, aby nedošlo k vypadnutiu skiel.
- Uistujte sa o správnom pohybe straníc v mieste pružného uchytenia (flex).
- Skrutky, sedlá, koncovky alebo ďalšie súčasti (nity, stranice) nechajte v prípade poškodenia nahradiť originálnymi alebo doporučenými náhradnými dielmi u optika.

Čistenie:

- Používajte na čistenie iba výrobky odporúčané optikom a neutrálne čistiace prostriedky a na sušenie vhodnú látku/kožu, ktorá nepôsobí škrabance a obrúsenie.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo alkohol/lieh, ani nešpecifické čistiace prostriedky, pokiaľ nie je určené inak.

Ostatné nebezpečenstvo:

- Alergické prejavy spôsobené materiálmi ako kov atď.
- Bolesti a otlaky uší / nosa spôsobené váhou rámu, nevhodným prispôbením tvaru rámu.
- Výrobok, ktorý sa dostal do styku s biologickým znečistením, môže byť pôvodcom chorôb.
- Poškodený výrobok môže spôsobiť ujmu užívateľovi (náhodné rozbitie, uvoľnenie látok).

Pravidelné kontroly:

- Pamätajte, že opravy a úpravy nemôžu zostať nemenné po celý život, sú teda nevyhnutné pravidelné aktualizácie a nemenej pravidelné kontroly.

Obsah balenia okuliarových rámov:

1x okuliarový rám

1x púzdro na okuliare

1x návod

Obsah balenia okuliarových rámov s klipom:

1x okuliarový rám

1x polarizačný slnečný klip

1x púzdro na okuliare

1x návod

Ďakujeme za nákup nášho produktu. www.aglaja.cz

